

Meditrade-Dosier-Tabelle



Ansatzmenge	0,10%	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%	1,50%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%
1 Liter	1 ml	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
2 Liter	2 ml	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml
4 Liter	4 ml	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml
8 Liter	8 ml	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	240 ml	320 ml	400 ml
10 Liter	10 ml	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml
20 Liter	20 ml	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	600 ml	800 ml	1000 ml
30 Liter	30 ml	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml

Anwendungsbeispiel: Die Menge des Wassers erhält man, wenn von der gewünschten Menge der Anwendungslösung die Menge des Desinfektionsmittels abgezogen wird.

Beispiel: 10 Liter einer 1%-igen Anwendungslösung = 100 ml Desinfektionsmittel +9,9 Liter Wasser.

Beim Ansetzen von Konzentraten oder Arbeiten mit Kalklöseprodukten unbedingt Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Schutzbrille).

Ansetzen von Lösungen nur in kaltem Wasser. Dabei ist die Reihenfolge zuerst Wasser, dann Desinfektionsmittel zu beachten.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.