

An alle
DeVilbiss Healthcare
Sauerstoff-Konzentrator
Fachhändler

ERKLÄRUNG ZUM AUSTAUSCH / ENTSORGUNG VON FIRESAFE™ RÜCKSCHLAGVENTILEN

FireSafe Nozzle und FireSafe Cannula sind thermische Rückschlagventile für Sauerstoffkonzentratoren, die im Brandfall die Sauerstoffzufuhr stoppen. Um die Funktionalität der Produkte zu gewährleisten, gelten nachfolgende Austausch- bzw. Entsorgungsempfehlungen.

FireSafe Cannula

Das Rückschlagventil hat eine Lebensdauer von 8 Jahren und ist nach dem angegebenen Herstellungsdatum zu entsorgen. Wenn das Rückschlagventil betätigt wurde, kann dieses nicht mehr neu eingestellt werden und ist ebenfalls zu entsorgen. Das Herstellungsdatum des Rückschlagventils lässt sich aus der zweiten Zeile des Chargencodes entnehmen; es ist in dem Format JJJJ.MM angegeben z.B. 2012.05. Austausch beim Patienten: s. letzter Absatz.

FireSafe Nozzle

Das FireSafe Nozzle Rückschlagventil ist wartungsfrei und hat eine voraussichtliche Lebensdauer von 8 Jahren. Die Nozzle ist acht Jahre nach dem angegebenen Herstellungsdatum zu entsorgen. Wenn das Rückschlagventil betätigt wurde, kann dieses nicht mehr neu eingestellt werden und ist ebenfalls zu entsorgen. Das Herstellungsdatum des Rückschlagventils lässt sich aus der zweiten Zeile des Chargencodes entnehmen; es ist in dem Format JJJJ.MM angegeben z.B. 2012.05. Austausch beim Patienten: s. letzter Absatz.

Was bedeutet die Herstellerangabe „Lebensdauer des Ventils“?

Die Lebensdauer, die vom Hersteller des Produktes angegeben wird, ist nicht gleichzusetzen mit dem Wechselintervall beim Gebrauch mit einem Patienten. Vielmehr stellt sie ein Mindesthaltbarkeitsdatum für das Produkt dar. Das Ventil soll nach dem angegebenen Zeitraum nicht mehr eingesetzt werden, weil die Funktionalität nicht mehr gewährleistet werden kann. Das bedeutet konkret: Wenn eine FireSafe Cannula oder Nozzle älter als 8 Jahre ist (auf Lager liegt) darf diese nicht mehr beim Patienten eingesetzt werden, sondern ist zu entsorgen.

Wann muss FireSafe beim Patienten gewechselt werden?

Der Hersteller empfiehlt bei der Verwendung beider Produkte an einem Patienten, je nach Umgebungsbedingungen, das Produkt alle 3 bis 6 Monate auszutauschen. Alle drei Monate z.B. dann, wenn es zu einer vermehrten Ansammlung von Kondenswasser kommt. Spectaris, der Fachverband für Medizintechnik empfiehlt in seinen aktuell gültigen Hygieneempfehlungen einen Austausch alle 6 Monate. Ferner soll das Ventil ausgetauscht werden, wenn es betätigt wurde und bei Patientenwechsel.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petra Täubel'.

i.A. Petra Täubel
Produkt Management International