

myAIRVO™ 2 - ERWEITERTES MENÜ

Zur Entsperrung des JUNIOR MODUS (ab Produktionsdatum 29. Oktober 2012 / LOT# 121029)
UPDATE zur Email vom 11. Februar 2013

- 1) Gerät einschalten
Während des Aufwärmvorgangs können folgende Aktionen durchgeführt werden:
 - a) Abfrage Patientenparameter, wie gezeigt (einmaliges drücken der Modustaste)
 - b) Wechsel in den Junior Modus, siehe Punkt 5 (falls entsperrt)
 - c) Wechsel in das „Erweiterte Menü“
(Alarm „stumm“ Taste + oben und unten Taste gedrückt halten)
- 2) Wechsel in das „Erweiterte Menü“
(Alarm „stumm“ Taste + oben und unten Taste gedrückt halten)
- 3) „Erweitertes Menü“ in der folgenden Abfolge:
 - a) Umstellung myAIRVO 2 in AIRVO 2 und zurück
 - b) Spracheinstellung
 - c) Grenzwerteinstellung für Temperatur und Flow (für Standardparameter)
 - d) Grenzwerteinstellung (für JUNIOR MODUS)*Abfolgeparameter können mit der Modustaste übersprungen werden oder durch gemeinsames halten der Tasten unten + oben zum Ändern aktiviert werden*
- 4) Grenzwerteinstellung (für JUNIOR MODUS)
 - a) JUNIOR MODUS deaktiviert (rote Markierung)
 - b) Aktivierung des JUNIOR MODUS durch gemeinsames halten der Tasten unten + oben
- 5) Wenn JUNIOR MODUS aktiv, kann während und nach dem Aufwärmvorgang durch gedrückt halten der Modustaste in den JUNIOR MODUS gewechselt werden

