


## WILAmEd AIRcon – Kurzanleitung

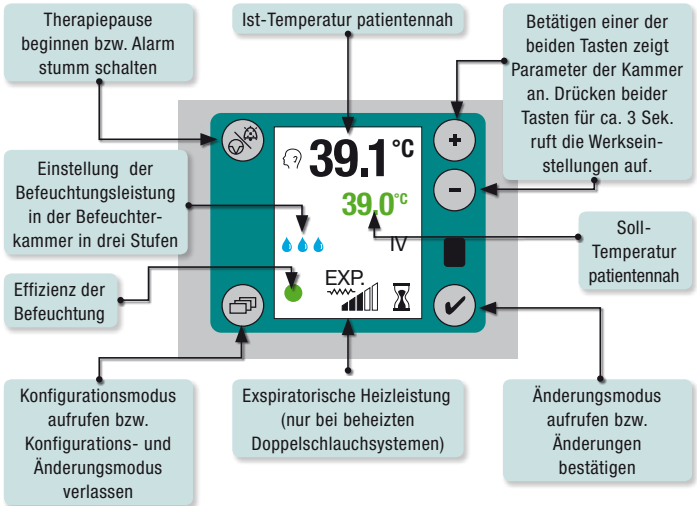

### Einstellhilfen

**Achtung! Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die Gebrauchsanweisung!**



**Vorgaben des Arztes oder Krankenhauses haben Vorrang vor diesen Empfehlungen!**




Alle Warnungen und Hinweise der Gebrauchsanweisung sind unbedingt zu beachten.

- „IV“-Modus: Werkseinstellung für invasiv beatmete Patienten (Soll-Temperatur: patientennah = 39°C; Kammer = 37°C max.)
- „NIV“-Modus: Werkseinstellung für maskenbeatmete Patienten (Soll-Temperatur: patientennah = 34°C; Kammer = 31°C max.)
- „Free“-Modus: Individuelle Betriebsparameter eingeben
- Kondensatschleier im Patiententubus = Befeuchtung ausreichend
- Kein Kondensat = Befeuchtungsleistung erhöhen
- Zu viel Kondensat = Befeuchtungsleistung verringern
- Befeuchtungsleistung kann über Wassertropfen von 1 Tropfen (min.) bis 3 Tropfen (max.) oder im „FREE“-Mode mittels der Kammertemperatur angepasst werden.

## Einstellungen verändern

Änderungsmodus durch Drücken der Taste  für 3 Sek. aufrufen.


Mit den Tasten  und  das zu ändernde Element auswählen.

Durch Drücken der Taste  wird das ausgewählte Element gelb unterlegt und kann mit den Tasten  und  erhöht bzw. verringert werden.

Eingestellten Wert mit der Taste  bestätigen.

Änderungsmodus durch Drücken der Taste  verlassen.

## Anzeige im Änderungsmodus

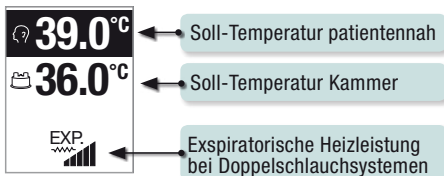

Wenn Werkseinstellung „IV“ oder „NIV“ geändert wird, so wird automatisch in den „Free“-Modus gewechselt.

## Einstellungen im Konfigurationsmodus

Konfigurationsmodus durch Drücken der Taste  für 3 Sek. aufrufen.

