

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV

Einrichtung/Arbeitsbereich: WKM GmbH Emmering: Warenwirtschaft / Lager / Unreiner Raum

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

NOCOLYSE (One Shot / Neutral)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

Verursacht schwere Augenreizung.

Das Produkt enthält Wasserstoffperoxid (6 %) und Silber (17 ppm).

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Gebrauchsfertige Lösung – nicht verdünnen. Zur Verwendung mit den Nocospray-/Nocomax-Geräten.

Verneblung des Produktes nur in Abwesenheit von Menschen.

Aufbewahrung: Lagerung nur in der Originalverpackung. Flaschen und Kanister stehend bei > 5 °C bis < 30 °C lagern. Vor Hitze und Sonnenlicht schützen.

Rückhaltung und Reinigung: Vorzugsweise mit Reinigungsmitteln reinigen, die Verwendung von Lösungsmitteln vermeiden.



Technische Schutzmaßnahmen: Zweckmäßige Lüftung gewährleisten, vor allem in geschlossenen Räumen.

In Räumen, in denen das Produkt ununterbrochen gehandhabt wird, Augenduschen vorsehen.

Persönliche Schutzmaßnahmen und -ausrüstung:

Saubere und korrekt instand gehaltene persönliche Schutzausrüstung tragen. Persönliche Schutzausrüstung an einem sauberen Ort, außerhalb des Arbeitsbereiches lagern.

Augenkontakt vermeiden. Immer Schutzbrille mit Seitenschutz (Korbbrille) tragen. Korrekturbrillen gewährleisten keinen ausreichenden Schutz. Bei erhöhter Gefahr Gesichtsschutzschirm verwenden.



Bei längerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete, undurchlässige Schutzhandschuhe tragen.

Empfohlene Handschuharten: Naturlatex, Nitril- oder Butylkautschuk, PVC.



Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln:

Nach jeder Verwendung die Hände waschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor dem erneuten Tragen waschen. Beschmutzte Körperteile waschen.

Während des Umgangs mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.

Umfüllen: Nur in leere, dafür vorgesehene Flaschen oder Kanister umfüllen. Behältnisse kennzeichnen.

Geeignete, dafür vorgesehene Hilfsmittel (z.B. Pumpe) benutzen. Verspritzen und Verschütten vermeiden.

Kontakt mit organischen Lösungsmitteln und Schwermetallen vermeiden – Explosionsgefahr.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Brand: Das Produkt ist nicht entflammbar, wirkt durch Sauerstofffreisetzung jedoch brandfördernd. Im Brandfall können sich gesundheitsgefährdende Zersetzungsprodukte bilden (Kohlenmonoxid/Kohlendioxid). Keinen Rauch einatmen.

Verschütten: Bei unbeabsichtigtem Verschütten mit viel Wasser verdünnen. Haut- und Augenkontakt vermeiden.

ERSTE HILFE – NOTRUF 112



Allgemeines: Im Zweifelsfall oder bei fortbestehenden Symptomen stets einen Arzt aufsuchen.

Niemals einer bewusstlosen Person Medikamente einflößen.

Bei Augenkontakt: 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit sauberem Frischwasser spülen.

Kontaktlinsen möglichst entfernen und weiter spülen. Bei Auftreten von Schmerzen, Rötungen oder einer Beeinträchtigung der Sehfähigkeit einen Augenarzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt: Haut sorgfältig mit Wasser und Seife waschen oder ein bekanntes Reinigungsmittel verwenden.

Beim Verschlucken: Einen Arzt aufsuchen und ihm das Etikett zeigen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgen des Produktes durch rückstandsfreies Verdünnen mit Wasser.

Die Leerverpackung kann komplett recycelt werden.

Unterschrift:

Datum:

22.02.2018

Nocolyse-BA-de-161123

WKM GmbH

Dr.-Rank-Straße 8

82275 Emmering

Telefon 08141/2297-0

Telefax 08141/2297-111