


AIRcon Gen2 - Kurzanleitung

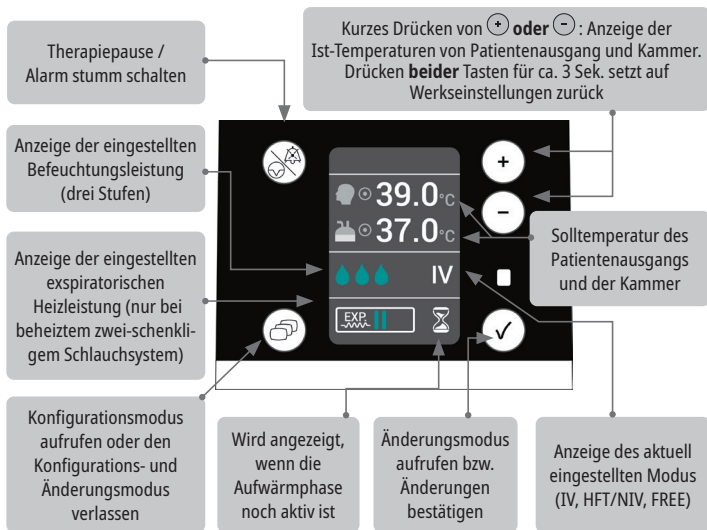

Einstellhilfen



Achtung! Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die Gebrauchsanweisung. Vorgaben des Arztes oder Krankenhauses haben Vorrang vor diesen Empfehlungen.




Alle Warnungen und Hinweise der Gebrauchsanweisung sind unbedingt zu beachten.

- „IV“-Modus: Werkseinstellung für invasiv beatmete Patienten (Solltemperatur: patientennah = 39 °C, Kammer = max. 37 °C)
- „HFT/NIV“-Modus: Werkseinstellung für maskenbeatmete Patienten (Solltemperatur: patientennah = 34 °C, Kammer = max. 31 °C)
- „Free“-Modus: Eingabe individueller Betriebsparameter
- Kondensatschleier im Patientenschlauch = Befeuchtung ausreichend
- Kein Kondensat = Befeuchtungsleistung erhöhen
- Zu viel Kondensat = Befeuchtungsleistung verringern
- Die Befeuchtungsleistung kann über Wassertropfen von 1 Tropfen (min.) bis 3 Tropfen (max.) oder im „FREE“-Modus mittels der Kammertemperatur angepasst werden.

Einstellungen ändern

Änderungsmodus durch Drücken der Taste  für 3 Sek. aufrufen.


Mit den Tasten  und  das zu ändernde Element auswählen.

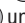Durch Drücken der Taste  wird das ausgewählte Element gelb unterlegt und kann mit den Tasten  und  erhöht bzw. verringert werden.

Eingestellten Wert mit der Taste  bestätigen.

Änderungsmodus durch Drücken der Taste  für 3 Sek. verlassen.

Anzeige im Änderungsmodus

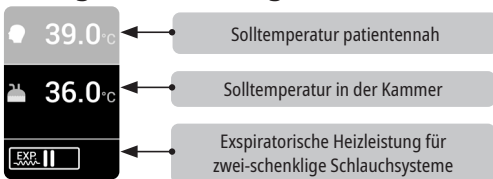

Wenn die Werkseinstellung „IV“ oder „HFT/NIV“ geändert wird, wechselt das System automatisch in den „FREE“-Modus.

Einstellungen im Konfigurationsmodus

Konfigurationsmodus durch Drücken der Taste  für 3 Sek. aufrufen.

