
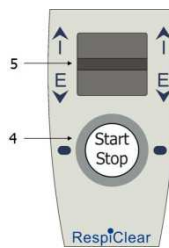


Kurzbedienungsanleitung Klinik

Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht das Lesen der Bedienungsanleitung. Vor der Inbetriebnahme überprüfen Sie bitte alle Zubehörteile und das Gerät auf Vollständigkeit und evtl. Schäden.

Bedienfeld Gerät und Fernbedienung

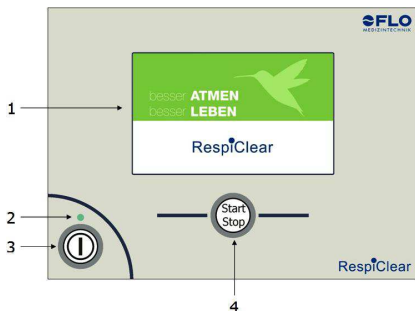


- 1 Display
- 2 LED (Anzeige Gerätestatus; Grün = Standby)
- 3 EIN / AUS Taste
- 4 Start / Stop Taste
- 5 Schalter
I – Insufflation
E - Exsufflation

Gerät einschalten

Gerät über EIN/AUS Taste einschalten. Standby bei Anzeige der Online Darstellung.

Schlauch anschließen

Bakterienfilter geräteseitig anbringen.
Druckmessleitung muss an den Anschluss gedreht werden – nicht stecken!

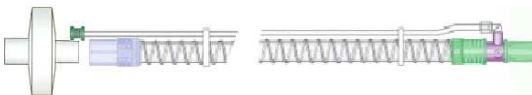

Starten / Unterbrechen / Beenden der Therapie


Durch Drücken der Taste Start / Stop am Gerät oder der Fernbedienung.
Im manuellen Modus durch Neutralstellung des Schalters.

Hilfe

Die Hilfe Funktion kann jederzeit durch Antippen des Buttons aufgerufen werden (nicht während der Therapie).



Allgemeiner Displayaufbau

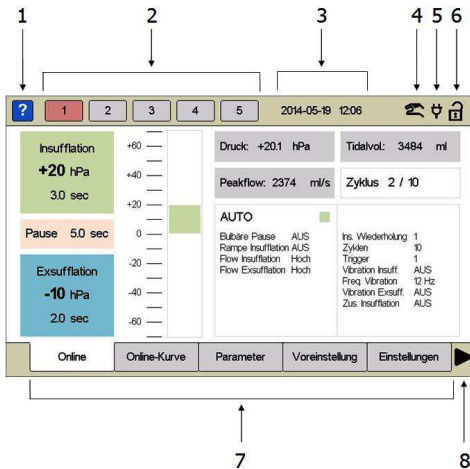

- 1 Hilfe
- 2 Voreinstellungen
- 3 Datum / Uhrzeit
- 4 Angeschlossene Bedieneinheiten
- 5 Anzeige Art der Stromzufuhr
- 6 Anzeige Status Verriegelung
- 7 Reiter (Menüpunkte)
- 8 Anzeige weitere Reiter (Menüdurchlauf)

Menüführung (Reiter)

- Online** aktuelle Werte und eingestellte Parameter
- Online-Kurve** Darstellung des aktuellen Therapieablaufs (Druck- und Flowkurve)
- Parameter** Einstellung der Modi und der dazugehörigen Parameter (Button anklicken und mit + oder – entsprechende Werte verändern (auch unter Therapie))
- Voreinstellung** kopieren, zurücksetzen, aktivieren bzw. deaktivieren von Parametereinstellungen
- Einstellungen** Gerätegrundeinstellungen (z.B. Sprache, Alarmlautstärke definieren)
- Compliance** zeigt für jede Voreinstellung die Nutzungsdauer an
- Service** Gerätespezifische Daten (z.B. Seriennummer, Betriebsstunden)

Auswahl Voreinstellungen

Gewünschte Voreinstellung antippen – wird farbig hinterlegt. Gesperrte Voreinstellungen sind durchgestrichen (hier Nr. 2).



Verriegelung

- Aktivieren über: Einstellungen / Verriegelung EIN
- Aktivierung erfolgt erst beim Verlassen des Reiters Einstellungen.
- Deaktivieren über: Einstellungen / gleichzeitiges Drücken von Verriegelung und Start / Stop Taste für 5 Sekunden.