


MPV TRUMA

Vorwort



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde.

Wir möchten Ihnen für Ihr Vertrauen und den Kauf unseres Produktes danken.
Das Absauggerät Mediport 2000 zeichnet sich durch seine Qualität, Sicherheit
und einfache Bedienung aus.

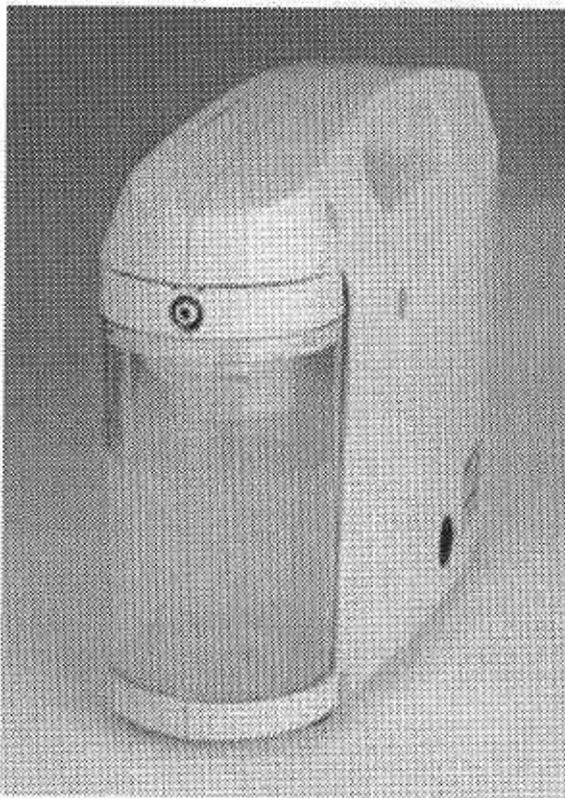

Damit Sie das Mediport 2000 richtig einsetzen können, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch!

Geräteübersicht

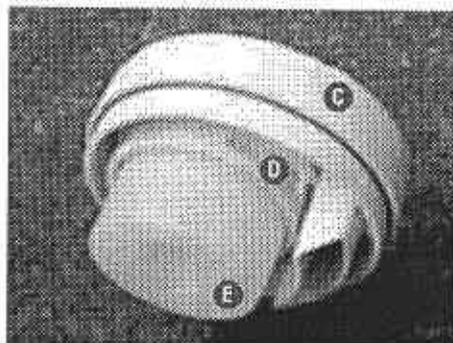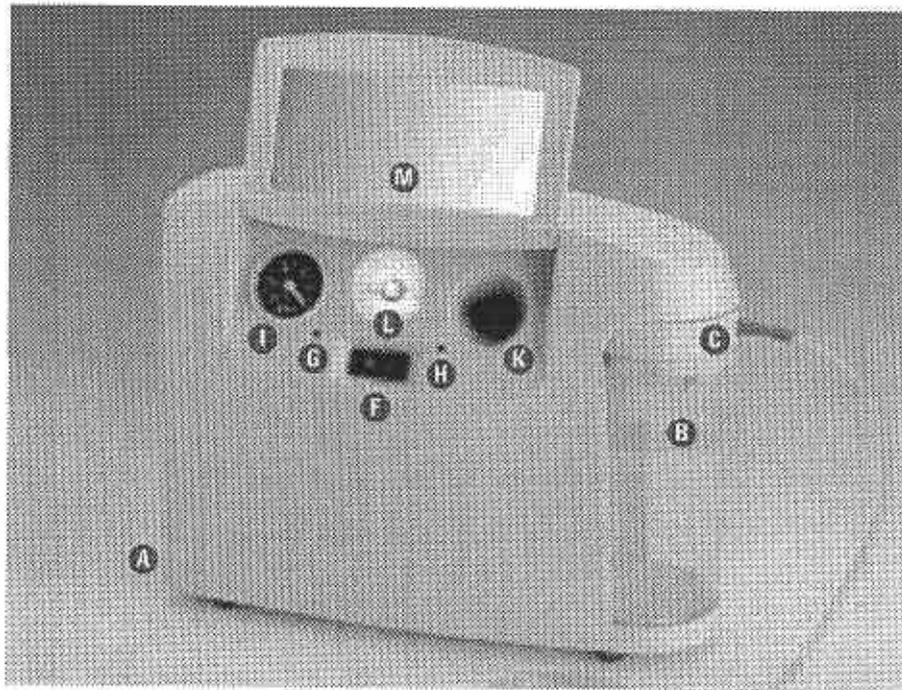

- Ⓐ Netzanschluß
- Ⓑ Sekretglas
- Ⓒ Deckel mit O-Ring
- Ⓓ Filterhalter
- Ⓔ Schwimmer
- Ⓕ Ein-/Aus-Schalter
- Ⓖ Anzeige für Netzanschluß GRÜN
- Ⓗ Ladeanzeige GELB
- Ⓘ Manometer
- Ⓝ Druckregler
- Ⓛ Lampe
- Ⓜ Spiegel

Achtung:

Aus hygienischen Gründen und wegen der Infektionsgefahr sollten Sie auch regelmäßig das Gehäuse reinigen! (Siehe Kapitel „Wartung / Reinigung“ bzw. „Reinigungs- und Pflegeplan“)


Alle Teile nach dem Reinigen trocknen!

Filterwechsel

Das Absauggerät ist mit einem auswechselbaren Bakterienfilter ausgerüstet. Dieses gewährleistet eine einwandfreie Hygiene während des Absaugens, denn es verhindert, daß Keime und Bakterien über das Gerät verwirbelt werden.

Wenn der Deckel naß geworden ist, spätestens aber nach zwei Wochen des Gebrauchs muß der Bakterienfilter erneuert werden.

1. Öffnen Sie hierzu den Filterhalter im Deckel, indem Sie ihn nach links bis zum Anschlag drehen und abheben (siehe Abbildung unten). Bakterienfilter entnehmen und Filterhalter sowie Deckel trocknen.
2. Den neuen Bakterienfilter so einlegen, daß der klare Kunststoffring zuerst in den Deckel eingelegt wird. Dann den Filterhalter wieder aufschrauben.
3. Die Einzelteile sind auch spülmaschinenfest. Der Bakterienfilter muß vor dem Spülen aus der Halterung entnommen und nach dem Spülen und Trocknen durch einen neuen Bakterienfilter ersetzt werden.

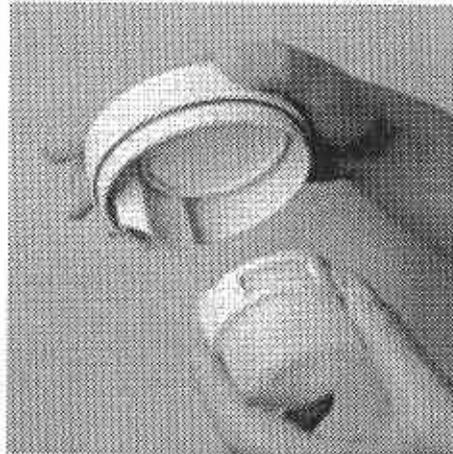**Hinweis:**

Der Bakterienfilter muß aus hygienischen Gründen mindestens alle zwei Wochen gewechselt werden!

Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Absauggerät Mediport 2000
- 1 Sekretglas mit Bakterienfilter und Schwimmer
- 1 Spülbecher mit Deckel
- 1 Fingertip
- 1 Netzkabel
- 1 Gebrauchsanweisung
- 10 Ersatzfilter

Verwendungszweck

Das Absauggerät Mediport 2000 ist generell im HNO-Bereich einsetzbar und gleichermaßen für laryngektomierte und tracheotomierte Patienten geeignet. Aufgrund seiner geringen Größe kann das Gerät nicht nur stationär, sondern auch im ambulanten Bereich verwendet werden.

Es kommt bei verstärkter Sekretbildung in Nase, Mund und Luftröhre, nach Kehlkopftfermungen und Operationen im Mund-Rachen-Bereich zur Anwendung.

Gerade bei kehlkopfloren Patienten ist ein Abhusten von Sekret aus der Luftröhre in der ersten Zeit nach der Operation nicht oder nur schwer möglich, da erst eine veränderte Hustentechnik (durch Zuhalten des Tracheostomas) erlernt werden muß. Daher ist, besonders in der Anfangszeit, das vorsichtige Absaugen wichtig, um frei atmen zu können.

Das Mediport 2000 darf nur für die oben aufgeführten Anwendungen benutzt werden. Für alle anderen Anwendungen und in Verbindung damit entstehenden Schäden jeglicher Art übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Bestellinformation

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt per VE
Mediport 2000 classic, Absauggerät 24 l/min Schwimmer, Sekretglas, Bakterienfilter mit Schwimmer, Spülbecher mit Deckel, Fingertip, Netzkabel, 10 Ersatzfilter und Gebrauchsanweisung	M 84700-00	1
Mediport 2000 mobil, Absauggerät 22 l/min, mit Akku Sekretglas, Bakterienfilter mit Schwimmer, Spülbecher mit Deckel, 10 Ersatzfilter und Gebrauchsanweisung	M 84710-00	1
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt per VE
Absaugkatheter Mediport zum Einmalgebrauch mit zentraler Öffnung und zwei seitlichen Augen, steril, 90 cm lang		
CH 8	M 80040-00800	50
CH 10	M 80040-01000	50
CH 12	M 80040-01200	50
CH 14	M 80040-01400	50
CH 16	M 80040-01600	50
CH 18	M 80040-01800	50
Fingertip	M 80040-02700	1
Bakterienfilter Mediport, 10er-Pack	M 80040-02000	10
Sekretglas ohne Deckel	M 80040-02100	1
Spülbecher mit Deckel	M 80040-02200	1
O-Ring Mediport	M 80040-02300	1
Lampe NF, 3,7 V	M 80040-02600	
Spiegelklappe	M 80040-02800	1
Gebrauchsanweisung Mediport 2000 classic/mobil	M 80040-02400	1
Autoadapter 12 V	M 80040-02500	

Technische Daten

Maße

Gerät inkl. Sekretglas (B x H x T): 315 x 240 x 120 mm

Gewicht

Mediport 2000 *classic*: 4,0 kg

Mediport 2000 *mobil*: 4,2 kg

Elektrische Werte

Nennspannung: 230 V~/ 50 Hz

Stromaufnahme max.: 0,35 A

Sicherung: 0,4 A

Leistungsaufnahme max.: 75 W

Schutzklasse: II Typ B

Sonstige

Saugleistung im Netzbetrieb: 24 l/min

Saugleistung im Akkubetrieb: 22 l/min

Endvakuum: -0,8 bar

Sekretglas/Spülbecher: 0,8 l / 0,35 l

Technische Änderungen vorbehalten !

Laden des Akkus (nur bei Mediport 2000 *mobil*)

Mit dem Einstecken des Netzkabels in eine 230V-Steckdose beginnt automatisch das Schnell-Laden des Akkus, was durch das Leuchten der gelben Ladeanzeige angezeigt wird.

Ein völlig entladener Akku benötigt ca. 90 Minuten zum Aufladen. Da nach dem Schnell-Laden automatisch auf einen Erhaltungsladestrom umgeschaltet wird, kann das Gerät unbegrenzt am Netz angeschlossen bleiben.

Zur Sicherheit und Schonung des Akkus schaltet das Ladegerät unter folgenden Bedingungen auf Erhaltungsladung zurück:

- **wenn der Akku voll ist**
- **wenn der Akku eine Temperatur von ca. 50°C überschreitet**
- **wenn seit Einstecken in die Steckdose 90 Minuten vergangen sind**

Die grüne Lampe zeigt an, daß das Gerät am 230V-Netz angeschlossen und betriebsbereit ist, selbst wenn der Akku einmal entladen sein sollte.

Wenn am Gerät nach dem Anschluß an die Steckdose die gelbe Ladeanzeige nicht leuchtet, kann das Gerät trotzdem angeschlossen bleiben. Man kann am Netz auf jeden Fall immer absaugen, selbst wenn der Akku einmal völlig leer oder sogar defekt sein sollte.

Mit einem vollen Akku kann ca. 35 Minuten lang ohne Netzanschluß abgesaugt werden. Das heißt, daß man z. B. elf mal 3 Minuten lang oder sieben mal 5 Minuten lang absaugen kann, bevor man das Gerät wieder an die Steckdose anschließen muß.

Wir empfehlen jedoch, das Mediport 2000 *mobil* grundsätzlich nach 3- bis 5-maligem Absaugen im Akkubetrieb (ohne daß es an der Steckdose angeschlossen war) zum Aufladen an die Steckdose anzuschließen. Es ist dann immer für einen mehrfachen Betrieb bereit, wenn man es einmal für unterwegs mitnehmen möchte, oder wenn der Strom ausfallen sollte.

Sollte das Mediport 2000 *mobil* einmal gar nicht mehr funktionieren oder sich nicht mehr aufladen lassen, sollten Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen.

Reinigungs- und Pflegeplan

Tägliche Maßnahmen an allen Arbeitsmitteln				Januar	Februar	März
Reinigungs- und Pflegemaßnahmen	Art der Maßnahme	Wiederholungsintervalle	Tag			
			1			
			2			
Sekretbehälter und Deckel			3			
	täglich	reinigen	4			
	nach jedem		5			
Absaugvorgang			6			
		wechseln	7			
			8			
			9			
			10			
	reinigen		11			
			12			
			13			
		wechseln	14			
			15			
			16			
			17			
			18			
	reinigen		19			
			20			
		wechseln	21			
			22			
			23			
			24			
			25			
			26			
	reinigen		27			
		wechseln	28			
			29			
			30			
			31			

MPVTRUMA

MPVTRUMA

Gesellschaft für medizintechnische
Produkte mbH

Wernher-von-Braun-Straße 12
D-85640 Putzbrunn bei München

Telefon 0049 (0)89 4 61 73 70
Telefax 0049 (0)89 4 61 73 90

Internet: www.mpv-truma.com

e-mail: info@mpv-truma.com

Vertriebsadresse:

Distributor: