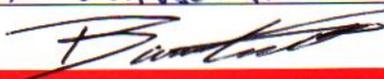


BETRIEBSANWEISUNG · Gemäß GefStoffV

Stand: 10.3.08

Betrieb: WKM GmbH
Dr.-Rank-Straße 8 Arbeitsplatz: Unreiner Raum
82275 Emmering
Gebäude: Telefon 08141/2297-0
Telefax 08141/2297-111 01.12.2017 Unterschrift: 

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG:

OROSEPT K

Natriummethyldiamintetraacetat, Fettalkoholethoxylat, 2-Propanol, Natriumcarbonat, Didecyldimethylammoniumchlorid

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT:



Reizend

R 41: Gefahr ernster Augenschäden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN:

S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 25: Berührung mit den Augen vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 39: Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort entfernen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL:

NOTRUF:
112

Siehe: **ÖRTLICHER ALARMPLAN**

Geeignete Löschmittel: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

ERSTE HILFE:



Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser (10 Min.) abspülen, Verband mit steriler Gaze anlegen; Facharzt konsultieren. Nach Verschlucken Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken, Arzt aufsuchen. Kein Erbrechen herbeiführen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG:

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Ungereinigte Verpackungen: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden. Abfallschlüsselnummer (EAK) für das ungebrauchte Produkt: 07 06 99 Abfälle a.n.g.



KLEEN PURGATIS GmbH · Dieselstraße 10 · D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40 · Fax +49 (0) 5223 9970-50 · www.kleen-purgatis.de

KLEEN PURGATIS INTERNATIONAL AG · Firststrasse 15 · CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68 · Fax +41 (0) 44 78686-69 · www.kleen-purgatis.ch

Ein Unternehmen der **BUDICH GRUPPE**